



1. Εισπνεύστε και στη συνέχεια φυσήξτε αργά προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται έως ότου ο σβόλος γίνει λευκός.
2. Κρατήστε τον αναπνευστήρα για 30" (δευτερόλεπτα) στο κλειστό σας χέρι.
3. Ερμηνεύστε το αποτέλεσμα με το διάγραμμα χρώματος στο φύλλο οδηγιών χρήσης.
4. Ενεργοποιήστε τη δοκιμή με διάτρηση των μεμβρανών αλουμινίου.

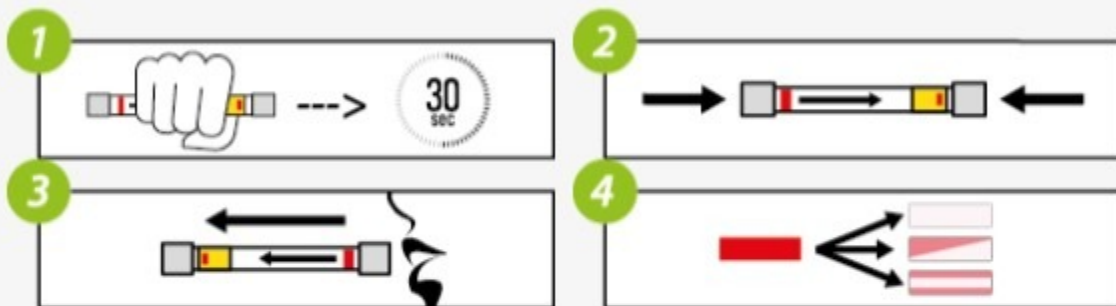

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΙΘΥΛΟΤΕΣΤ

$0,0 \text{ g/l} \leq \text{Τιμή} < 0,5 \text{ g/l}$

ΣΥΛΛΗΨΙΣ



ΘΕΤΙΚΟ ΑΙΘΥΛΟΤΕΣΤ

$\text{Τιμή} \geq 0,5 \text{ g/l}$

ΣΥΛΛΗΨΙΣ

